



Neo Dental International Inc.

PERIODON

牙根管用藥

用法

1. 清潔和製備牙根管
2. 將棉花或紙尖浸透 **Periodon** 後插入牙根管
3. 臨時性封閉牙根管
4. 15 分鐘後檢查有無疼痛
5. 如疼痛持續 把 **Periodon** 取出
6. 用 **Periodon** 治療不應超過 7 天
7. 應用於已失活的牙髓時 應減少藥物作用時間和劑量
8. 確保牙根管暫時封閉良好 防止 **Periodon** 泄出到口腔組織上

注意：*Periodon* 可能刺激口腔軟組織 應避免使其接觸口腔軟組織 最好使用橡皮障 一旦 *Periodon* 接觸到口腔 應立刻用大量清水清洗

禁忌：切勿將 *Periodon* 用於曾對多聚甲醛 甲醛或鹽酸待布卡因 切勿用於有過敏史 如過敏性休克的病患

包裝：每管 2 克

用途

牙根管的消毒
殘留牙髓的失活
牙髓拔除術後的止疼

成分

多聚甲醛 – 50% 強力長效消毒劑
鹽酸待布卡因 – 26% 局部麻醉和鎮
填充物 – 24%



Manufactured by:
Neo Dental Chemical Products Co. Ltd.
Tokyo, Japan



Neo Dental International Inc.

2505 South 320 Street, Suite 250

Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814

Fax: 253-946-0885

email: ndi@neodental-intl.com