



Neo Dental International Inc.

DENTALIS

Sellante de canales radiculares

Beneficios

- Excelente radiopacidad
- Antibacteriano
- Características de ideales de fluido
- Se adhiere a las paredes del canal radicular y a la gutapercha
- Asegura el cierre de la cavidad radicular pulpar

Excede los Estándares Internacionales

- Radiopaca
- Medicado
- Fluye de una manera sobresaliente

Indicaciones

- Sellante de canales radiculares
- Medicamento antibacteriano

Información Técnica

Radiopacidad	4.4 mm AL
Fluido	31.0 mm
Sollubilidad	1.75%
Tiempo de endurecimiento	5-10 minutos
Tiempo de trabajo	4-6 horas



Manufactured by:
Neo Dental Chemical Products Co. Ltd.
Tokyo, Japan



Neo Dental International Inc.

2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814

Fax: 253-946-0885

email: ndi@neodental-intl.com

DENTALIS

Sellante de canales radiculares

Presentación


- 15 gms. de polvo
- 10 ml. de líquido
- Cucharada dispensadora y almohadilla para mezclar

Almacenamiento

- Evite la luz solar.
- almacene a temperatura ambiente.

Instrucciones para su utilización

1. Prepare el canal, lave y seque el canal.
2. Mezcle 1 cucharada de polvo con 3 gotas de líquido para formar una pasta que fluya.
Mezcle una cucharada de polvo con 2 gotas de líquido para una pasta suave.
El Dentalis endurece a temperatura ambiente en un lapso 4 - 6 horas.
3. Aplique el Dentalis en las paredes del canal.
4. Cubra la punta de gutapercha con DENTALIS.
5. Introduzca la punta de gutapercha cubierta de DENTALIS en el canal.
6. Aplique DENTALIS en las puntas accesorias antes de introducirlas.
7. DENTALIS endurece en la boca e un lapso de 5-10 minutos.
8. Cinfirme el relleno ideal con una radiografía.
9. Remueva el exceso de gutapercha y selle la apertura coronal.

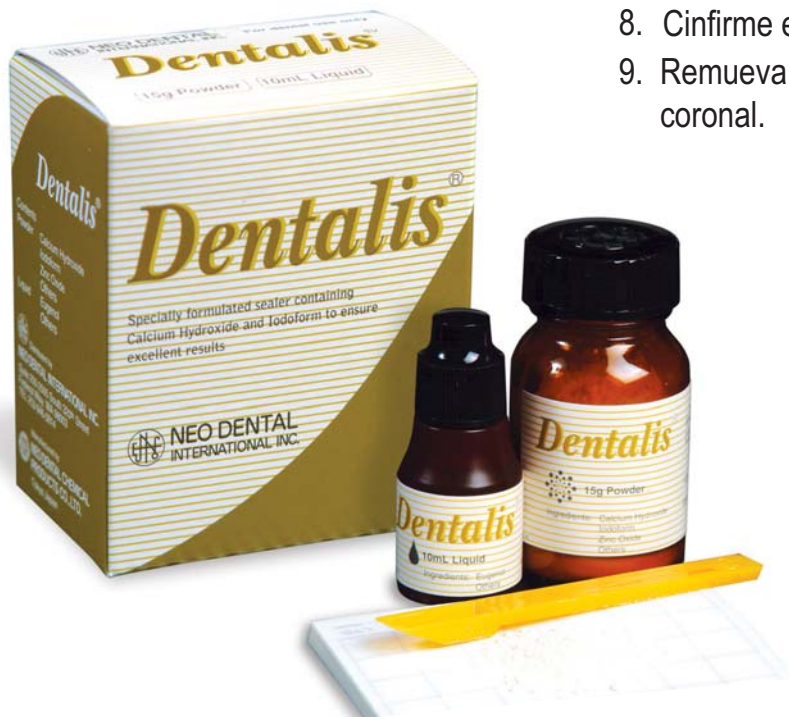

Neo Dental International Inc.
2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814
Fax: 253-946-0885

email: ndi@neodental-intl.com